

## NOTICE D'UTILISATION DES LENTILLES HYBRIDES

# EyeBrid™

### Bienvenue chez LCS

Vous avez choisi **un tout nouveau mode de correction** avec la dernière innovation en lentilles de contact du laboratoire LCS. Les lentilles EyeBrid sont des **lentilles hybrides**, c'est à dire qu'elles sont composées de deux matériaux différents : le centre en matériau rigide à haute perméabilité à l'oxygène, la périphérie en matériau souple.

Développée et fabriquée en France par une jeune équipe de Recherche et Développement basée à Caen dans le Calvados, EyeBrid est la 1<sup>re</sup> lentille de contact hybride à renouvellement trimestriel. **Elle allie le confort d'une lentille souple avec la performance visuelle d'une lentille rigide.**

La lentille EyeBrid **offre une sécurité maximale** et un respect total de la santé oculaire grâce à sa **parfaite oxygénation de l'œil** et la présence d'**un filtre UV protecteur**.

EyeBrid est une lentille trimestrielle à **port quotidien**. Elle doit donc être retirée, nettoyée et déposée dans un étui quotidiennement. Son **renouvellement tous les 3 mois** par une lentille neuve permet un entretien simple et des lentilles toujours confortables. Elle se manipule différemment d'une lentille souple et nous vous invitons à lire cette notice attentivement et à suivre les recommandations qui vous sont données afin de profiter pleinement des avantages que vous offrent vos nouvelles lentilles.


## LA POSE



Hygiène des mains




Rinçage de la lentille

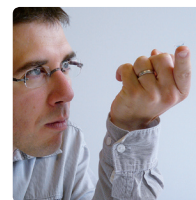

Vérification de l'intégrité de la lentille



Paupières écartées

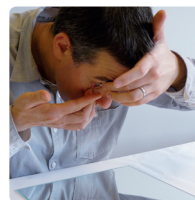

Pose de la lentille

### 1 Avant chaque pose

- Une bonne hygiène des mains est le premier pas vers un port confortable et pérenne. Lavez-vous systématiquement les mains avec du savon, rincez-les abondamment et séchez-les avec une serviette propre avant de manipuler vos lentilles.
- Maquillez-vous toujours après avoir posé vos lentilles. Il est préférable de ne pas utiliser de crayon sur le bord interne des paupières. De la même manière, démaquillez-vous uniquement après avoir retiré vos lentilles de contact afin d'éviter toute contamination.

### 2 L'ouverture du conditionnement

- Le conditionnement doit être vérifié intact avant la 1<sup>re</sup> utilisation. La lentille doit toujours être immergée dans la solution prévue à cet usage.
- Une procédure de nettoyage doit être effectuée avant la 1<sup>re</sup> pose.
- Placez-vous de préférence au-dessus d'une surface propre et bien dégagée.
- Commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion. Si vous êtes droitier, commencez toujours par la lentille droite.
- Retirez la lentille de son emballage avec votre doigt en prenant soin de ne pas abimer la lentille avec vos ongles.

### 3 Rincez votre lentille

- Si vous manipulez votre lentille au-dessus d'un lavabo, assurez-vous que celui-ci est bien fermé.
- Posez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec le produit recommandé par votre spécialiste pour retirer toute impureté. Il est formellement interdit de rincer vos lentilles de contact à l'eau courante.

### 4 Vérifiez votre lentille

- Assurez-vous que votre lentille est propre et en bon état, ne présente ni débris, ni rayures, ni déchirures. Si la lentille semble endommagée, ne l'utilisez pas.

### 5 Posez votre lentille

- Utilisez un miroir posé à plat puis regardez-vous dans le miroir.
- Utilisez votre majeur pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter la paupière supérieure en les maintenant à la base des cils pour éviter tout clignement.
- Approchez la lentille vers votre œil et posez-la délicatement sur la cornée. Lâchez doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l'excès de larmes.

### 6 Contrôlez votre lentille

- Contrôlez le centrage de votre lentille sur votre œil. Si vous remarquez des bulles d'air, un problème de centrage ou en cas d'inconfort, retirez la lentille et reposez-la en suivant la même procédure.

## LE RETRAIT



Étui et produit prêts avant retrait



Retrait de la lentille

### 1 Avant chaque retrait

- Lavez-vous soigneusement les mains et assurez-vous d'avoir un étui propre, une serviette propre et vos produits d'entretien à portée de main.
- Commencez toujours par manipuler la même lentille pour éviter toute inversion droite/gauche.

### 2 Retirez votre lentille

- Regardez dans le miroir, positionnez votre index juste en dessous du bord libre de la paupière inférieure et l'index de l'autre main sur le bord libre de la paupière supérieure afin d'éviter que la lentille ne remonte lors du retrait. Ensuite, avec l'index posé sur la paupière inférieure, exercez une légère pression puis remontez la paupière vers le haut afin de soulever la lentille. La lentille perd son adhésion d'abord par le bas, puis toute la lentille se libérera d'elle-même. Vous pouvez maintenant la réceptionner avec votre pouce et index.

- **Ne pas « pincer » la lentille** qui est à manipuler avec précaution. Veillez également à ne pas abîmer la lentille avec vos ongles.
- La lentille ne doit jamais « coller » sur votre œil. Consultez votre spécialiste si le retrait est difficile. Le retrait d'une lentille est un geste précis qui peut demander un peu d'entraînement. La manipulation de retrait se maîtrise facilement en suivant rigoureusement les instructions.
- **L'utilisation d'une ventouse pour le retrait de votre lentille EyeBrid est contre-indiquée.**

## L'ENTRETIEN

### Le nettoyage de votre lentille

- Il est impératif de nettoyer systématiquement vos lentilles après les avoir portées.
- Avant de procéder au nettoyage de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez jamais la solution restante et renouvelez systématiquement la totalité du liquide.
- Au retrait de la lentille, massez votre lentille entre le pouce et l'index avec un produit multifonctions ou un produit de nettoyage pour lentilles souples pendant environ 20 secondes puis rincez-la.
- Placez votre lentille dans son étui et remplissez-le de produit multifonctions. Pensez à placer la lentille droite dans le compartiment noté R (Right) et la gauche dans le compartiment noté L (Left).
- Laissez les lentilles tremper au minimum 6 heures jusqu'à la prochaine utilisation pour une parfaite décontamination.
- Après une semaine sans utilisation des lentilles, la solution de décontamination doit être renouvelée avant de poser les lentilles sur les yeux.
- Veillez à garder votre étui propre et remplacez-le régulièrement. Adressez-vous à votre contactologue pour plus d'informations.

Vos lentilles de contact EyeBrid doivent être minutieusement entretenues et renouvelées par une paire de lentilles neuves tous les 3 mois. Le respect des règles d'entretien vous garantira un port confortable en toute sécurité.

SCANNEZ CE FLASH CODE  
POUR ACCÉDER AUX VIDÉOS DE

**MANIPULATION  
DE LA LENTILLE**



WWW.LABORATOIRE-LCS.COM

14 place Gardin  
14000 Caen - France  
Tél. +33 231 86 66 56  
info@laboratoire-lcs.com



LENTILLES SAS © ALL RIGHTS RESERVED 2014

## Les bons produits d'entretien

- Pour l'entretien de vos lentilles **EyeBrid Silicone**, utilisez un produit multifonctions pour lentilles souples ou un système à base de peroxyde d'hydrogène au quotidien.
- Pour l'entretien de vos lentilles **EyeBrid 1.0**, utilisez un produit multifonctions pour lentilles souples au quotidien. Le peroxyde d'hydrogène est contre-indiqué pour les lentilles EyeBrid 1.0.
- Lisez bien le mode d'emploi du produit utilisé.
- En cas de larmes grasses, vous pouvez utiliser un produit de nettoyage pour lentilles souples le soir au retrait. Il est préférable de ne pas porter la lentille dans l'heure qui suit le nettoyage. Une déprotéinisation hebdomadaire pour lentilles souples est conseillée.
- Votre contactologue pourra vous renseigner sur les produits indiqués pour l'entretien de vos lentilles EyeBrid. Suivez scrupuleusement ses recommandations.

## CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

### Précautions d'emploi

- Consultez toujours votre praticien pour une première utilisation, puis régulièrement afin de vérifier que vos lentilles sont toujours bien adaptées et en bon état.
- Les complications oculaires liées au port de lentilles sont rares si vous suivez les recommandations des professionnels. Toutefois, si les symptômes suivants se produisent, retirez vos lentilles et contactez votre ophtalmologiste :
  - Un œil rouge ou irrité
  - Une sensation d'inconfort ou de gêne persistante
  - Un changement anormal de votre vision
  - Une sensibilité accrue à la lumière
  - Des larmoiements ou une sensation de sécheresse
- Si vous sentez une gêne anormale, retirez votre lentille et rincez-la avec une solution de rinçage.
- En cas de grossesse, de prise de certains médicaments ou de pathologies oculaires, le port de lentilles peut-être contre-indiqué : retirez vos lentilles et consultez votre praticien.
- Prenez conseil auprès de votre praticien avant d'utiliser un collyre.
- Les lentilles peuvent être inconfortables dans les milieux très poussiéreux, lorsque les lentilles sont exposées à un gaz ou à des liquides toxiques ou irritants et au cours de situations dangereuses liées à une activité professionnelle.
- Les sports de baignade sont inadaptés au port de lentilles en raison de la majoration du risque infectieux lié aux amibes présentes dans l'eau des rivières et des piscines.
- La cornée sous lentille peut manquer d'oxygène lors des efforts prolongés ou en haute altitude.
- Les lentilles ne protègent pas l'œil des coups directs (balle de tennis, de golf...).
- La lentille ne doit jamais rester à sec et doit être conservée loin des sources de chaleur.

Cachet du distributeur





1<sup>re</sup> année de marquage CE : 2012

Chaque lentille est conditionnée dans un emballage contenant une solution de décontamination.

Les informations suivantes sont précisées sur l'étiquette :

Nom et adresse du fabricant

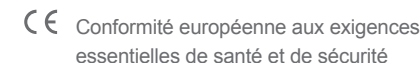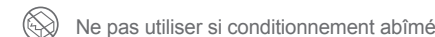

## En cas de perte ou de casse

- Avoir une paire de lentilles de secours élimine tout risque d'avoir un confort visuel interrompu. Des solutions en pack existent. Prenez contact avec votre opticien.

DATE D'OUVERTURE DE L'ÉTUI OU DU 1<sup>er</sup> BLISTER

CEIL GAUCHE

CEIL DROIT

DATE D'OUVERTURE DU 2<sup>ème</sup> BLISTER

CEIL GAUCHE

CEIL DROIT