

LA POSE

Lavez-vous les mains soigneusement avant chaque manipulation. Utilisez un savon non gras.



Assurez-vous que votre lentille est propre et en bon état. Si la lentille semble endommagée, ne l'utilisez pas.

Rincez votre lentille. Posez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec le produit recommandé par votre spécialiste pour retirer toute impureté. Il est formellement interdit de rincer vos lentilles de contact à l'eau courante.

Regardez-vous dans un miroir. Utilisez votre majeur pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter la paupière supérieure.

Approchez la lentille vers votre œil et posez-la délicatement sur la cornée. Lâchez doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l'excès de larmes.

Contrôlez le centrage de votre lentille sur votre œil. Si vous remarquez des bulles d'air, un problème de centrage ou en cas d'inconfort, retirez la lentille et reposez-la en suivant la même procédure.

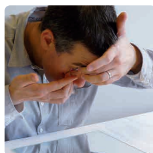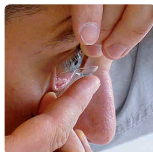

LE RETRAIT

Avant de procéder à la décontamination de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez jamais la solution restante.

Lavez-vous les mains soigneusement avant chaque manipulation

Regardez dans le miroir, positionnez votre index sur la paupière inférieure et l'index de l'autre main sur la paupière supérieure. Avec l'index posé sur la paupière inférieure, exercez une légère pression puis remontez la paupière vers le haut afin de soulever la lentille. Vous pouvez réceptionner la lentille avec votre pouce et index.

Ne pas « pincer » la lentille qui est à manipuler avec précaution. Veillez également à ne pas abimer la lentille avec vos ongles.

La lentille ne doit jamais « coller » sur votre œil. Consultez votre spécialiste si le retrait est difficile.



L'utilisation d'une ventouse peut faciliter le retrait de votre lentille. Dans ce cas, la ventouse ne doit pas être placée au centre de la lentille, mais sur la périphérie souple, en partie inférieure.

Chaque lentille est conditionnée dans un emballage contenant une solution de décontamination.

Les informations suivantes sont précisées sur l'étiquette :

- Nom et adresse du fabricant
- Consulter la notice
- Référence commerciale de la lentille
- Date limite de première utilisation
- Numéro de série de la lentille
- Ne pas utiliser si conditionnement abîmé

Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité et numéro de l'organisme notifié

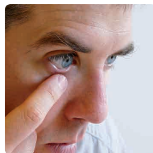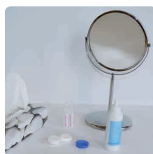

L'ENTRETIEN

Au quotidien, utilisez un produit multifonction pour lentilles souples. Les lentilles sont aussi compatibles avec les produits à base de peroxyde. Mais veillez alors à bien utiliser les étuis dédiés et à bien suivre les procédures de neutralisation.

Avant de procéder à la décontamination de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez jamais la solution restante.

Au retrait de la lentille, massez votre lentille pendant environ 20 secondes entre le pouce et l'index avec un produit multifonction ou, en cas de larmes grasses ou dépôts, avec un produit de nettoyage pour lentilles souples exclusivement, puis rincez-la.

Placez votre lentille dans son étui et remplissez-le de produit multifonction en suivant la notice d'utilisation du produit utilisé. Après une semaine sans utilisation des lentilles, la solution de décontamination doit être renouvelée avant de poser les lentilles sur les yeux.

Lisez et suivez bien le mode d'emploi des produits d'entretien utilisés.

Suivez les recommandations de votre contactologue.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Maquillez-vous toujours après avoir posé vos lentilles.

Les complications oculaires liées au port de lentilles sont rares si vous suivez les recommandations des professionnels. Toutefois, si les symptômes suivants se produisent, retirez vos lentilles et contactez votre spécialiste :


- Un œil rouge ou irrité
- Une sensation d'inconfort ou de gêne persistante
- Un changement anormal de votre vision
- Une sensibilité accrue à la lumière
- Des larmoiements ou une sensation de sécheresse

Si vous sentez une gêne anormale, retirez votre lentille et rincez-la avec une solution de rinçage.

Prenez conseil auprès de votre praticien avant d'utiliser un collyre.


La lentille ne doit jamais rester à sec et doit être conservée loin des sources de chaleur.

Scannen Sie den QR-Code für mehr Informationen und Videos

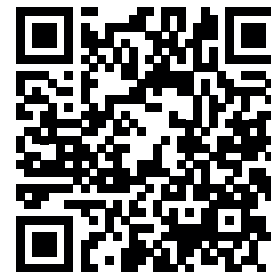

Hersteller: LCS SAS, 14000 Caen - Frankreich
Vertrieb durch SwissLens SA, 1008 Prilly Schweiz

Scanner le code QR pour plus d'informations et pour visualiser les vidéos

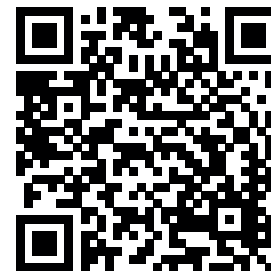

Fabricant: LCS SAS, 14000 Caen - France
Distribution: SwissLens SA, 1008 Prilly Suisse

AirFlex

Handhabungsanweise der Hybrid kontaktlinsen




Notice d'utilisation des lentilles hybrides

AirFlex

AUFSETZEN

Waschen Sie sich vor
jedem Kontakt mit
ihren Linsen Ihre
Hände gründlich ohne
rückführende Seife.
Überprüfen Sie, ob
Ihre Linse sauber
und in einwandfreiem
Zustand ist. Wenn
die Linse beschädigt
zu sein scheint, darf
sie nicht verwendet
werden.
Abspülen: Legen Sie
die Linse dazu in Ihre
Handfläche und
spülen Sie mit dem
von Ihrem Spezialisten
empfohlenen Produkt
ab, um alle
Umrheinien zu
entfernen.
Bitte vermeiden Sie
jeglichen Kontakt Ihrer
Kontaktlinse mit
Leitungswasser.

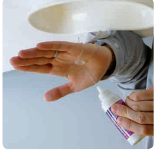


Sehen Sie in den
Spiegel. Verwenden
Ihre Mittelfinger,
um das Unterlid
herunter zu ziehen,
um das Oberlid hoch
zu ziehen.
Nähern Sie die Linse
ihrem Auge und
setzen Sie sie
vorsichtig auf die
Hornhaut. Lassen Sie
die Augenlider los und
blinzeln Sie mehrmals,
um überschüssige
Tränenflüssigkeit zu
entfernen



Kontrollieren Sie die Zentrierung der Linse auf
Ihrer Auge. Wenn Sie Luftblasen oder ein
Zentrierungsproblem bemerken oder wenn die
Linse Unbehagen verursacht, nehmen Sie sie
heraus, spülen sie ab und setzen Sie sie auf
die gleiche Weise wieder ein.

ABSETZEN

Bereiten Sie alle
Reinigungsprodukte
und den Behälter vor
und den Behälter des
Peroxidbass. Verwenden Sie die speziellen
Behälter und beachten Sie die Neutralisations-
vorgänge.
Bevor Sie Ihre Linse aufsetzen, leeren Sie Ihren
Linsenebehälter. Die darin enthaltene restliche
Lösung darf niemals wiederverwendet werden.
Nach dem Herausnehmen reiben Sie Ihre Linse
für ca. 20 Sekunden zwischen Daumen und
Zeigefinger mit einer Kombination, oder bei
fettigem Tränenfilm oder Ablagerungen mit
einem Oberflächereiniger (alkoholisch)
spülen Sie die Linsen ab. Danach
geben Sie die Linsen in ihren Behälter und
füllen Sie diesen mit dem Multifunktionsprodukt
gemäß der Gebrauchsanweisung des
verwendeten Produkts.
Nach einer Woche ohne Verwendung der Linsen
muss die Reinigungslösung erneuert werden.
Bevor die Linsen auf die Augen aufgesetzt werden,
Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanwei-
sung der verwendeten Reinigungsprodukte.

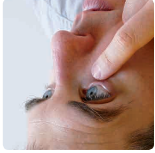

Üben Sie mit dem auf das Unterlid aufgesetzten
Zeigefinger leichten Druck aus und schieben Sie
das Unterlid nach oben, um die Linse
anzuheben. Sie können die Linse mit Daumen
und Zeigefinger abnehmen.

Behandeln Sie die Linse sorgfältig, knicken Sie
nicht und passen Sie auf, dass sie sich nicht
mit den Fingerrägeln beschädigen.
Die Linse darf niemals auf Ihrem Auge „kleben“.
Wenden Sie sich an Ihren Spezialisten, wenn Sie
Schwierigkeiten beim Entfernen der Linse
haben. Die Verwendung eines Kontaktlinsensaugers
kann das Herausnehmen der Linse
vereinfachen. In diesem Fall darf der Sauger
nicht auf die Mitte der Linse aufgesetzt werden,
sondern auf den unteren Teil des weichen
Randes.
Jede Linse wird in einer Verpackung mit
Reinigungslösung geliefert.
Das Etikett enthält folgende Angaben:
- Name und Address des Herstellers
- Bestellnummer der Linse
- Haltbarkeitsdatum für die 1. Anwendung
- Seriennummer der Linse
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

PLIEGE

Verwenden Sie für die tägliche Pflege nur
Produkte welche für weiche Kontaktlinsen
geeignet sind. Kombination und Produkten auf
Peroxidbasis. Verwenden Sie die speziellen
Behälter und beachten Sie die Neutralisations-
vorgänge.
Bevor Sie Ihre Linse aufsetzen, leeren Sie Ihren
Linsenebehälter. Die darin enthaltene restliche
Lösung darf niemals wiederverwendet werden.
Nach dem Herausnehmen reiben Sie Ihre Linse
für ca. 20 Sekunden zwischen Daumen und
Zeigefinger mit einer Kombination, oder bei
fettigem Tränenfilm oder Ablagerungen mit
einem Oberflächereiniger (alkoholisch)
spülen Sie die Linsen ab. Danach
geben Sie die Linsen in ihren Behälter und
füllen Sie diesen mit dem Multifunktionsprodukt
gemäß der Gebrauchsanweisung des
verwendeten Produkts.
Nach einer Woche ohne Verwendung der Linsen
muss die Reinigungslösung erneuert werden.
Bevor die Linsen auf die Augen aufgesetzt werden,
Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanwei-
sung der verwendeten Reinigungsprodukte.
Beachten Sie die Empfehlungen Ihres
Kontaktlinsenspezialisten.
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH
Schminken Sie sich immer nach dem Aufsetzen
der Linsen.
Augenkomplikationen aufgrund des Tragens von
Linsen sind selten, wenn Sie die Empfehlungen
und Hinweise des Spezialisten beachten. Sollten
jedoch folgende Symptome auftreten, nehmen
Sie die Linsen heraus und wenden Sie sich
umgehend an Ihren Spezialisten:
- Rotes oder gereiztes Auge
- Gefühl des Unbehagens oder anhaltendes
stärkendes Gefühl
- Anormale Veränderung Ihrer Sehkraft
- Gestiegene Lichtempfindlichkeit
- Tränende Augen oder Gefühl der Trockenheit
- Wenn Sie ein anomales Unbehagen verspüren,
nehmen Sie die Linse heraus und spülen Sie die
Kontaktlinse ab (Kochsalz oder Kombilösung).
Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie
Augentropfen verwenden.
Die Linse darf niemals austrocknen und muss
immer von Wärmequellen entfernt aufbewahrt
werden.